

DaVinci Pro Quick Start Anleitung



Quick Start DaVinci Pro



Schwenk/drehbarer Kamerakopf
um unterschiedliche Ziele
anzusteuern

Antippen: Einschalten/Standby
Drücken und Halten: Abschalten


Farbe und Kontrast
umschalten

Umschalten zwischen
OCR & CCTV

DaVinci Pro Quick Start Anleitung

Einfacher Modus

Einfach und schnell

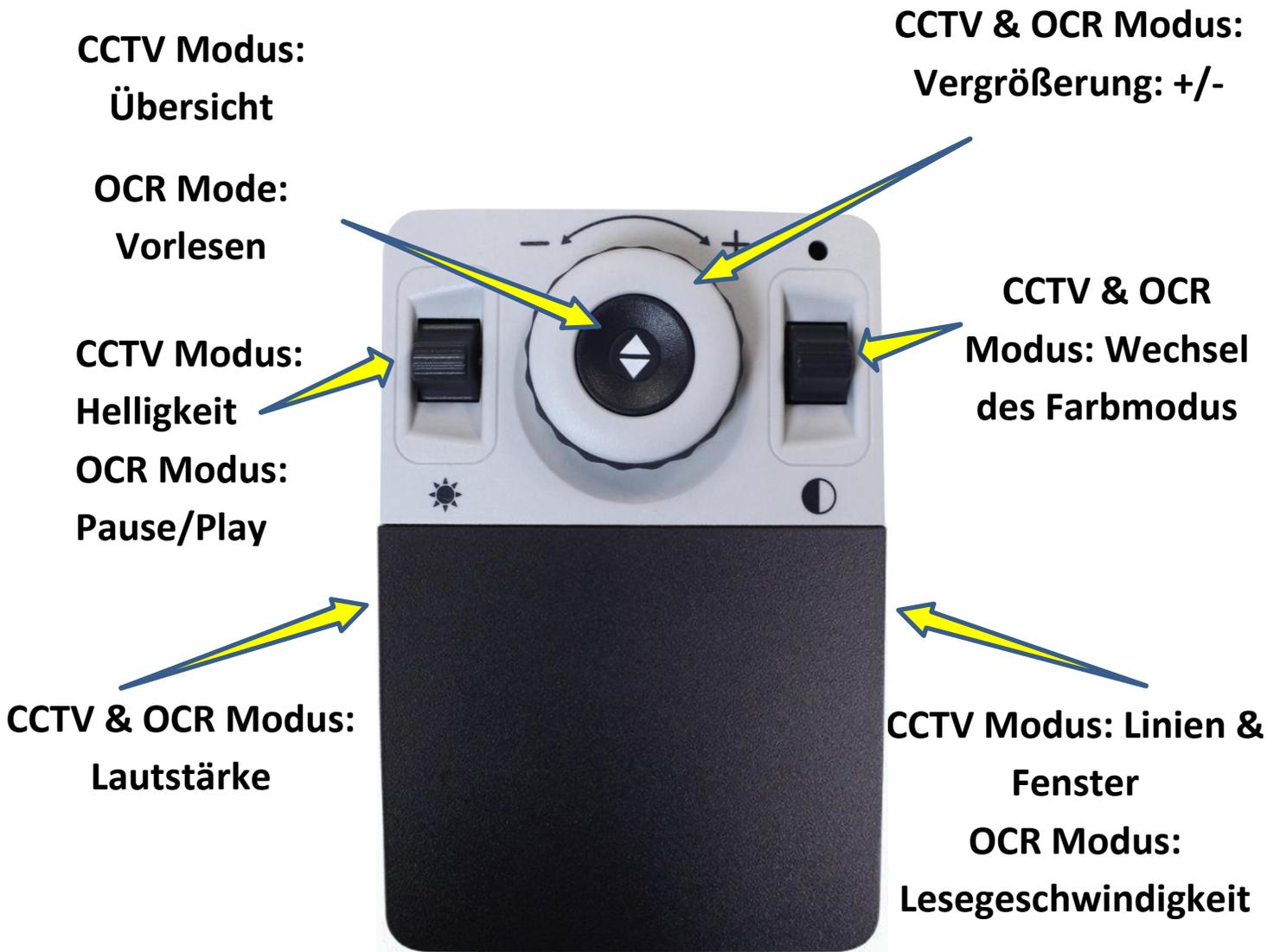

DaVinci Pro Quick Start Anleitung

Erweiterter Modus

CCTV Modus: Übersicht

CCTV & OCR Modus:
Vergrößerung: +/-

CCTV Modus:
Helligkeit
OCR Modus:
Pause/Play

CCTV & OCR Modus:
Wechsel des
Farbmodus

CCTV & OCR Modus:
Lautstärke

CCTV Modus:
Markierungen
OCR Modus:
Lesegeschwindigkeit

OCR Modus: Pause/Play

OCR Modus: OCR
Einlesen/Erfassen

OCR Modus:
Bild speichern

OCR Modus:
Nächster/Vorheriger
Bereich oder Nächste
/Vorherige Zeile

CCTV & OCR
Modus:
Dateiverwaltung



DaVinci Pro Quick Start Anleitung

Tipps und Tricks

Quick Tipps

Wechseln zwischen CCTV & Ganzseiten OCR scannen durch Drücken der mittleren Taste am DaVinci Pro!



Entfernen Sie die Konsolenabdeckung und wechseln vom einfachen auf den erweiterten Modus.



Einstellungen/Optionen durch Drücken der Tasten Modus hoch & Find (mittlerer Konsolenknopf)



Die Darstellung rechts zeigt den Bildschirm und Kamera Einstellungen die Sie am DaVinci Pro einstellen können.

